

ODOFINTM

TasteStrips




Taste Test 25

burgdorf
MESSTECHNIK

LATVIEŠU



PZN: 17975326

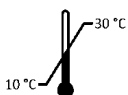

Burghart Messtechnik GmbH
Uetersener Straße 6
D - 25488 Holm
☎ +49 4103 80076-0
📠 + 49 4103 80076-29

✉ info@burghart-mt.de
💻 www.burghart-mt.de



Contenu

Destination.....	4
Utilisateurs.....	4
Domaines d'application	4
Groupe d'âge	4
Avertissements	4
Contre-indication.....	4
Information aux patients.....	5
Information aux utilisateurs	5
Présentation.....	5
Mise en œuvre.....	5
Durabilité	5
le stockage :.....	5
Élimination	5
Accessoires	5
Tissus utilisés	6
LEGEND	6

IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Destination

Examen d'orientation pour déterminer si la capacité de goûter est présente.

Utilisateurs

Le test doit être effectué exclusivement par du personnel médical qualifié.

Domaines d'application

Environ 10 à 15 % des patients souffrant de troubles olfactifs présentent également des troubles gustatifs. Il est donc recommandé de vérifier non seulement l'odorat mais aussi le goût. Les bandelettes dans les 4 qualités gustatives de base "sucré", "acide", "salé" et "amer" permettent d'examiner la fonction gustative.

Le "Taste Test 25" est un test d'accompagnement du "Screening 12 Test" et permet de déterminer si d'autres examens doivent être entrepris.

Le "Taste Test 50" est un examen plus approfondi. Il contient des bandes gustatives avec des qualités gustatives de base "sucré", "acide", "salé" et "amer" dans 4 concentrations différentes, afin de pouvoir déterminer la gravité d'un trouble gustatif.

Groupe d'âge

Il n'y a pas de limite d'âge pour le test.

Avertissements



Demandez à vos patientes si elles sont enceintes. La qualité gustative amère ne doit PAS être utilisée sur les femmes enceintes. La quinine est utilisée comme substance amère.



N'utiliser la bandelette de dégustation qu'UNE seule fois par patient ou par zone de la langue. Ensuite, la bandelette doit être jetée.



Ce test ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'une des substances utilisées (voir tableau à la page 6).



Évitez tout contact avec la peau lors de l'administration et utilisez la pince à épiler fournie.



Évitez de faire des mouvements rapides avec la bandelette gustative pendant son utilisation dans la bouche.



Notez qu'un produit compromis peut donner lieu à une évaluation erronée.

Le produit peut être compromis par :

- Changement de concentration dû à un mauvais stockage
- test incomplet ou confusion des bandelettes gustatives si les récipients de conservation fournis ne sont pas utilisés
- Changement de concentration dû à une utilisation au-delà de la date de péremption
- en cas de non-respect de l'application correcte, telle que décrite dans le mode d'emploi
- en cas d'application incorrecte, due à une inscription illisible ou manquante

Contre-indication

Ne pas utiliser la "bande gustative" amère en cas de grossesse existante. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'une des substances utilisées.

Information aux patients

Le patient doit être informé du test de la manière suivante : Son sens du goût doit être testé. Cela se fait à l'aide de bandelettes gustatives. Vous léchez des bandes de carton imprégnées de différentes concentrations de substances gustatives sucrées, acides, salées et amères. Les substances utilisées pour le test sont inoffensives pour la santé sous la forme présentée et sont utilisées dans les aliments (saccharose, chlorure de sodium, acide citrique, quinine - comme dans le citron amer).

Si vous ne pouvez pas sentir le goût, veuillez l'indiquer ("pas de goût"). Lors de l'évaluation du test, il sera tenu compte de votre capacité à percevoir ou à identifier une qualité.

Le test dure environ 5 minutes par patient.

Information aux utilisateurs

L'utilisation se fait lors de la vérification de la capacité gustative en plaçant les bandelettes gustatives sur la langue et en fermant la bouche (la langue peut être déplacée par le patient). Si l'on s'intéresse à la sensibilité gustative de certaines zones de la langue (par exemple, test de séparation des côtés), la bouche reste ouverte et la bandelette n'est en contact qu'avec cette zone jusqu'à ce que le patient puisse donner une réponse. Les substances utilisées dans le test, telles qu'elles sont présentées, ne présentent aucun risque pour la santé et sont utilisées dans les aliments (saccharose, sel de cuisine, acide citrique, quinine - comme par exemple dans le citron amer).

Présentation

Prenez la pincette dans une main et ouvrez simultanément la boîte avec l'autre main. Les bandelettes gustatives doivent être retirées **UNIQUEMENT** avec la pincette fournie. La réponse du patient peut être notée sur la feuille d'évaluation () , mais elle n'a AUCUNE influence sur le score du test Screening 12.

Mise en œuvre

Retirez la bandelette à l'aide de la pincette fournie et placez-la au milieu de la langue, de sorte que la bandelette dépasse encore un peu de la bouche. Le patient doit maintenant fermer la bouche et bouger légèrement la langue. Après 5 à 10 secondes, on peut demander au patient quel goût il a perçu. Retirez la bandelette.

Il est recommandé d'attendre au moins 30 secondes entre les présentations des différentes bandes et de laisser le patient se rincer la bouche à l'eau. De plus, "amer" (boîte M) doit être proposé en dernier, car c'est le goût qui reste le plus longtemps présent. Comme pour le test olfactif, une carte de sélection de termes est à disposition.

Durabilité

Chaque bandelette de dégustation porte une date de péremption. Le format est JJ MM AA. Non ouvertes, les lamelles se conservent 5 ans.

Après ouverture, la durée de conservation est limitée à 12 mois. Inscrire la période de la première ouverture sur le symbole (12M) collé sur la boîte.

le stockage:

Conserver au sec, à température ambiante (10 - 30 °C), pas au réfrigérateur.

Élimination



Les bandelettes anti-salissures utilisées doivent être immédiatement jetées avec les déchets ménagers.


Accessoires

Composant	Numéro d'article
Pincette	LA-13-00310
Boîte de rangement	LA-13-00338
Carte à choix multiple	LA-18-00080

Tissus utilisés

Qualité gustative	Tissu
Acide	Acide citrique
Salé	Chlorure de sodium
Doux	Saccharose
Amer	Chlorhydrate de quinine dihydraté
Solvants	Aqua Bidest

LEGEND

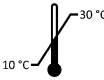	Identification
	Résolution
	Groupe d'âge
	Température d'application
	Date de péremption
	Protéger des rayons du soleil
	Respecter le mode d'emploi
	Conserver au sec
	Fabricant
	Observer les avertissements
	A utiliser une seule fois
	Ne pas utiliser en cas de grossesse
	Doux
	Salé
	Acide
	Amer